

A quoi servent-ils ?

Ils permettent :


- de renforcer l'étanchéité entre la stomie et l'appareillage,
- de prévenir les risques de fuites,
- d'appareiller des stomies :
 - ovales,
 - planes, invaginées, rétractées ou dans un pli,
 - situées sur un abdomen ferme, mou ou flasque.



Comment les utiliser ?

Chauffez le protecteur cutané entre vos mains et enlevez les films de protection, en commençant par le film blanc.

- 1 Positionnez le Protecteur Cutané Renforcé Ovale directement sur le support (système 2 pièces) ou sur la poche (système 1 pièce), face plane sur l'appareillage, en l'ajustant à la découpe.
- 2 Appliquez l'ensemble de l'appareillage du bas vers le haut en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de plis cutanés pour éviter tout risque de fuite.
- 3 Maintenez fermement l'ensemble de l'appareillage quelques secondes.

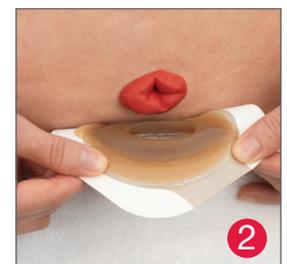

Questions fréquemment posées

| | |
|---|--|
| Est-ce que l'on peut étirer l'anneau ? | Il n'est pas recommandé d'étirer l'anneau car il a une forte mémoire de forme. |
| Est-ce que je peux positionner la face plane de l'anneau directement sur la peau ? | Non. L'anneau doit être positionné face convexe autour de la stomie sinon il perd l'intérêt de la convexité. Positionnez toujours la surface plane de l'anneau sur le support de l'appareillage. |
| Puis-je utiliser ces anneaux sur des supports plans et convexes ? | Oui. Sur des supports plans une convexité souple modérée est obtenue. Sur des supports convexes, on obtient une convexité ferme profonde. Demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute. |
| Puis-je empiler, couper les anneaux ? | Oui. Pour un joint plus doux entre les deux anneaux coupés, vous pouvez utiliser quelques pointes de Pâte Adapt. |
| Puis-je utiliser les anneaux sur une peau endommagée, irritée, suintante ? | Oui. Utilisez un peu de Poudre Adapt pour aider à la cicatrisation et absorber l'humidité d'une peau suintante. Appliquez ensuite l'appareillage. |
| Ma stomie n'est pas ovale, puis-je utiliser ce protecteur cutané renforcé ? | Si votre stomie est ronde, utilisez l'ADAPT Protecteur Cutané Renforcé Rond (cf. au dos). |



| Produit | Diamètre | Référence |
|---------------------------|------------|--------------|
| Adapt Protecteurs Cutanés | 22 x 38 mm | 79601 |
| Renforcés Ovales | 30 x 48 mm | 79602 |
| (Boîte de 10 unités) | 38 x 56 mm | 79603 |

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).



Hollister
Bernstrasse 388
8953 Dietikon
0800 55 38 39
info@hollister.ch
www.hollister.ch

A quoi servent-ils ?




Ils permettent :

- de renforcer l'étanchéité entre la stomie et l'appareillage,
- de prévenir les risques de fuites,
- d'appareiller des stomies :
 - rondes ou irrégulières,
 - planes, invaginées, rétractées ou dans un pli,
 - situées sur un abdomen ferme, mou ou flasque.

Comment les utiliser ?

Chauffez le protecteur cutané entre vos mains et enlevez les films de protection, en commençant par le film blanc.

- 1 Positionnez le Protecteur Cutané Renforcé Rond directement sur le support (système 2 pièces) ou sur la poche (système 1 pièce), face plane sur l'appareillage, en l'ajustant à la découpe.
- 2 Appliquez l'ensemble de l'appareillage du bas vers le haut en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de plis cutanés pour éviter tout risque de fuite.
- 3 Maintenez fermement l'ensemble de l'appareillage quelques secondes.

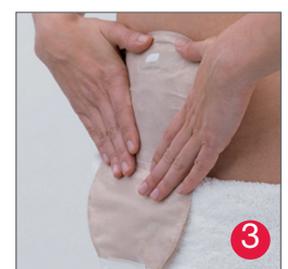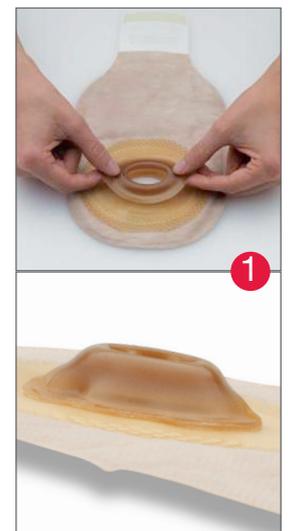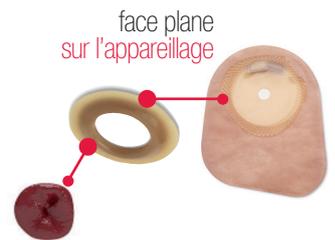

Questions fréquemment posées

| | |
|---|--|
| Est-ce que l'on peut étirer l'anneau ? | Il n'est pas recommandé d'étirer l'anneau car il a une forte mémoire de forme. |
| Est-ce que je peux positionner la face plane de l'anneau directement sur la peau ? | Non. L'anneau doit être positionné face convexe autour de la stomie sinon il perd l'intérêt de la convexité. Positionnez toujours la surface plane de l'anneau sur le support de l'appareillage. |
| Puis-je utiliser ces anneaux sur des supports plans et convexes ? | Oui. Sur des supports plans une convexité souple modérée est obtenue. Sur des supports convexes, on obtient une convexité ferme profonde. Demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute. |
| Puis-je empiler, couper les anneaux ? | Oui. Pour un joint plus doux entre les deux anneaux coupés, vous pouvez utiliser quelques pointes de Pâte Adapt. |
| Puis-je utiliser les anneaux sur une peau endommagée, irritée, suintante ? | Oui. Utilisez un peu de Poudre Adapt pour aider à la cicatrisation et absorber l'humidité d'une peau suintante. Appliquez ensuite l'appareillage. |
| Ma stomie n'est pas ronde, puis-je utiliser ce protecteur cutané renforcé ? | Si votre stomie est ovale, utilisez l'ADAPT Protecteur Cutané Renforcé Ovale (cf. au dos). |



| Produit | Diamètre | Référence |
|---|----------|--------------|
| Adapt Protecteurs Cutanés Renforcés Ronds | 20 mm | 79520 |
| (Boîte de 10 unités) | 30 mm | 79530 |
| | 40 mm | 79540 |

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).



Hollister
 Bernstrasse 388
 8953 Dietikon
 0800 55 38 39
 info@hollister.ch
 www.hollister.ch