

Avant les soins, préparez
tout le matériel nécessaire :

- Nouvel appareillage (poche, support)
- Produits nécessaires à la toilette :
eau du robinet, savon de Marseille
- Compresse ou essuie-tout
- Stomimètre/gabarit
- Stylo
- Ciseaux
- Sachet pour la poche usagée

Découpe du matériel

1. Reproduisez le gabarit ou le stomimètre
sur le support.
2. Découpez soigneusement à l'extérieur
de la ligne tracée. **Attention à ne pas
perforer la poche.** Lissez la découpe
avec le doigt.



système 1 pièce (le support et la poche forment 1 élément)



système 2 pièces à emboîtement

(le support et la poche forment 2 éléments)



système 2 pièces adhésif



Conseils et remarques : _____

*Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit,
n'hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).*



 **Hollister**
Hollister
Bernstrasse 388
8953 Dietikon
0800 55 38 39
info@hollister.ch
www.hollister.ch

Pouchkins système 1 pièce, système 2 pièces à emboîtement et système 2 pièces adhésif, sont des dispositifs médicaux de stomathérapie de classe I fabriqués par Hollister Incorporated. Ce sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils s'utilisent sur ordonnance et selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé compétent. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage avant utilisation. Hollister et son logo et Pouchkins, sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. FR0078 – Décembre 2013 Version internet 2017

8953 / 0800 55 38 39



 **Hollister**

Soins de la stomie

Expliquez au bébé ce que l'on va faire. Maintenez la peau d'une main et décollez le protecteur cutané ou le support du haut vers le bas avec l'autre main. Vous pouvez vous aider d'une compresse mouillée.

système 1 pièce

(le support et la poche forment 1 élément)

système 2 pièces à emboîtement

(le support et la poche forment 2 éléments)

système 2 pièces adhésif

(le support et la poche forment 2 éléments)

Retirez l'appareillage en maintenant la peau avec les doigts



Nettoyez la peau et la stomie avec une compresse non tissée imbibée d'eau. Séchez en tamponnant.



Vérifiez et adaptez régulièrement le diamètre de la stomie à l'aide du gabarit ou du stomimètre.

Les conseils de la stomathérapeute

- Installez-vous confortablement sur une table à langer ou sur un lit.
- Détournez l'attention de l'enfant pendant le soin avec un doudou, un jouet, une sucette, un biberon, et en lui parlant.
- La peau autour de la stomie doit être saine. Si la peau est irritée, contactez votre stomathérapeute.
- Attention à ne pas plier la poche en mettant la couche, afin que les selles et/ou urines s'écoulent bien à l'intérieur.
- Pour les tout petits : chantez ou racontez une histoire.
- N'utilisez pas de savon, crème protectrice, lingette bébé, talc ou autres lotions qui laissent une pellicule grasse sur la peau et peuvent être allergisants.
- Vous pouvez utiliser les autocollants présents à l'intérieur des boîtes pour noter la date du prochain changement de poche.



Mise en place d'un appareillage Pouchkins

Système 1 pièce : *changement tous les jours.*



- Chauffez le support entre vos mains et retirez le film protecteur de la poche.



- Positionnez l'appareillage en faisant correspondre le bas de la découpe avec le bas de la stomie.



- Lissez avec le doigt en commençant au plus proche de la stomie et maintenez l'appareillage quelques secondes.

Système 2 pièces à emboîtement : *changement du support tous les 2-3 jours et de la poche tous les jours¹.*



- Chauffez le support entre vos mains et retirez le film protecteur du support.



- Positionnez le support en faisant correspondre le bas de la découpe avec le bas de la stomie.



- Emboîtez la poche sur le support du bas vers le haut en glissant vos doigts sous l'anneau flottant pour ne pas appuyer sur l'abdomen de bébé.



- N'oubliez pas de fermer le clamp pour une poche vidable ou le bouchon pour une poche vidangeable.

Système 2 pièces adhésif : *changement tous les jours¹.*



- Retirez le film protecteur de la poche.



- Collez la poche sur le support en centrant les 2 éléments.
- Maintenez la poche et le support ensemble quelques secondes.



- Retirez le film protecteur du support.
- Pliez le support en deux en positionnant le bas de la découpe avec le bas de la stomie et lissez avec le doigt.

MEMO :



Le doudou «Shadow Buddies». Un outil pédagogique pour accompagner les parents et les enfants dans la prise en charge d'une stomie.
<http://www.shadowbuddies.org/>

¹AFET, "Guide des bonnes pratiques en stomathérapie chez l'enfant, 2003"