

### A quoi sert-elle ?

- Elle absorbe l'humidité d'une peau péristomiale suintante.
- Elle aide à la cicatrisation d'une peau péristomiale irritée.

### Comment l'utiliser ?

- A chaque changement de votre appareillage :
- 1 Saupoudrez autour de votre stomie sur une peau parfaitement propre.
  - 2 Retirez délicatement l'excès de poudre avec de l'essuie-tout, compresse ou autre.
  - 3 Mettez votre appareillage en place comme à votre habitude.



### Questions fréquemment posées

<b>J'utilise des anneaux. Puis-je aussi utiliser la poudre ?</b>	Elle peut être utilisée avec d'autres accessoires. La poudre se mettant sur une peau à vif ou suintante, les anneaux peuvent être appliqués par-dessus.
<b>Quelle quantité dois-je appliquer ?</b>	Il suffit de recouvrir la zone à traiter et d'enlever le surplus de poudre.
<b>Dois-je l'appliquer sur le protecteur cutané ou sur la peau péristomiale ?</b>	La poudre s'applique directement sur la peau.
<b>Dois-je remettre de la poudre à chaque changement d'appareillage ?</b>	Oui, vous pouvez l'utiliser tant que c'est nécessaire lors des changements de votre appareillage, en suivant les indications de votre soignant(e).

### En quoi cela va-t-il m'aider ?

- Adapt Poudre permet d'absorber l'excès d'humidité de la peau qui se trouve autour de votre stomie.
- Elle augmente la protection de la peau autour de la stomie.
- Elle renforce la tenue de votre appareillage.



Produit	Référence
Adapt poudre Flacon de 28,30 g	<b>7906</b>

**Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).**



**Hollister**  
Bernstrasse 388 8953  
Dietikon  
0800 55 38 39  
info@hollister.ch  
www.hollister.ch