


A quoi servent-ils ?

- Ils comblent les irrégularités autour de la stomie.
- Ils renforcent l'étanchéité.
- Ils préviennent le risque de fuites.



Comment les utiliser ?

- 1 Sortez le protecteur cutané de son emballage.
- 2 Ajustez le protecteur cutané avec vos doigts pour lui donner la taille, la forme et l'épaisseur souhaitées.
Pour cela, vous pouvez :
 - A Etirer
 - B Couper et ajuster
 - C Aplanir les bords
 - D Superposer pour créer un anneau plus petit
- 3 Placez le protecteur cutané autour de la stomie ou sur l'appareillage.
- 4 Maintenez plusieurs secondes en place.
- 5 Positionnez votre appareillage comme à votre habitude.

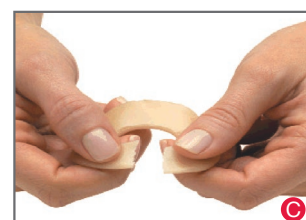

Questions fréquemment posées

Ma stomie n'est pas ronde, est-ce que je peux utiliser les protecteurs cutanés ?	Oui, ceux-ci sont modelables et s'adaptent à tous les types de stomies.
Puis-je l'utiliser si ma peau est irritée ?	Tout à fait, c'est un anneau en hydrocolloïde. Il ne contient pas d'alcool donc aucun risque de picotements.
Comment puis-je le retirer ?	Il se retire simplement lors du changement de l'appareillage.

Comment vont-ils m'aider ?

- Ils renforcent la sécurité de votre support.
- Ils adhèrent à la peau même sur une surface humide.
- Ils soulagent la peau sensible autour de la stomie.



Produit	Diamètre	Référence
Adapt Protecteurs Cutanés Standards	48 mm	7805
	48 mm-slim	7815
	98 mm	7806
Adapt CeraRing	48 mm	8805
Protecteurs Cutanés Standards (boîte de 10 unités)	48 mm / 2.3mm	8815



Hollister
Bernstrasse 388
8953 Dietikon
0800 55 38 39
info@hollister.ch
www.hollister.ch