





VaPro

Sonde hydrophile à usage unique




Le système urinaire féminin

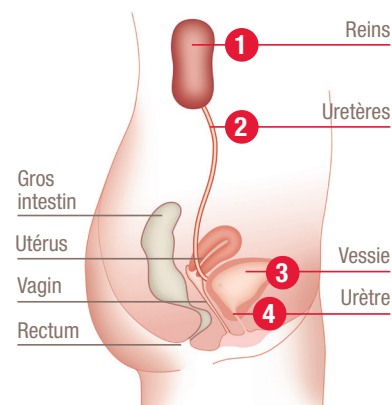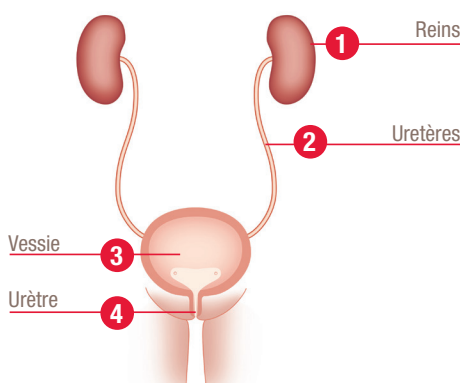

- 1 Les reins filtrent les déchets du sang et produisent l'urine.
- 2 L'urine est transportée des reins vers la vessie par les uretères.
- 3 Les deux principales fonctions de la vessie sont le stockage et la vidange des urines. La vidange de la vessie implique la coordination de muscles volontaires et de muscles autonomes et nécessite un système nerveux intact.
- 4 L'urine passe alors dans l'urètre et est expulsée en dehors du corps.

Positions possibles pour la pratique de l'autosondage

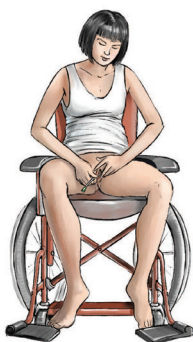

Assise sur la chaise roulante, devant les toilettes, en faisant basculer le bassin en avant.



Debout, à côté ou devant les toilettes.



Assise sur les toilettes.

Hollister Suisse
Bernstrasse 388
8953 Dietikon

044 730 45 05
info@hollister.ch

 Hollister



VaPro


Mode d'emploi femme



1 Lavez-vous les mains.



2 Ouvrez l'emballage en tirant doucement vers le bas sur le fil d'ouverture.

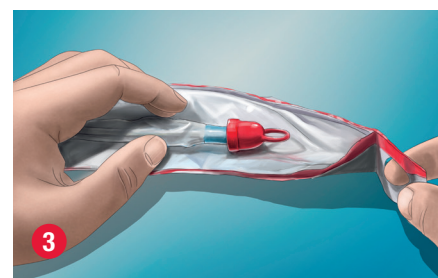

3 Laissez l'emballage sur une surface plane ou collez-le sur un mur.



4 Nettoyez le méat urinaire à l'eau et au savon ou avec une lingette humide, ou avec du désinfectant comme enseigné par votre équipe soignante.



5 Enlevez le capuchon.



6 Dirigez la sonde vers les toilettes ou connectez-la à une poche de recueil.



7 Poussez la sonde dans la gaine protectrice, sans la faire sortir de la gaine.



8 Ecartez les lèvres, insérez la gaine protectrice au niveau du méat urinaire, puis faites progresser la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie. Laissez s'écouler l'urine. Retirez la sonde doucement.



9 Jetez la sonde dans un endroit approprié.



10 Lavez-vous les mains.

Notes
