

L'ileostoma

Se si utilizzano sacche di raccolta aperte, si tratta di regola di un'ileostomia, un'apertura alla fine dell'intestino che viene di solito creata quando è stata necessaria la rimozione chirurgica del colon e del sistema sfinterico.

Spesso le escrezioni sono molli o liquide.

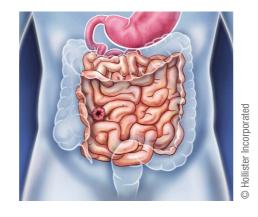

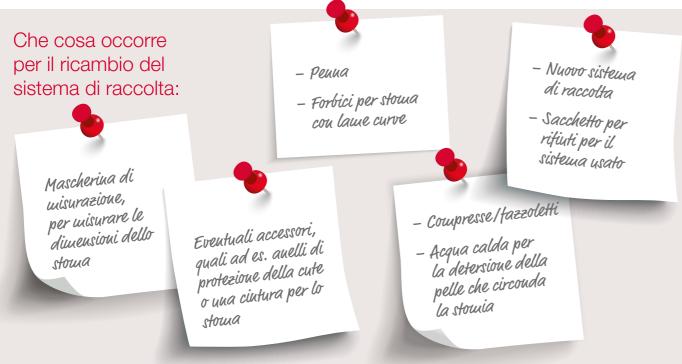

Hollister Svizzera

Liberty Medical Switzerland AG Bernstrasse 388 8953 Dietikon

Telefono: 0800 55 38 39 - numero gratuito E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch


MD Dispositivo medico (se) applicabile Flangia (anello di aggancio)





Prima dell'uso, si prega di leggere le istruzioni per l'uso per informazioni sull'uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni. © 2021 Hollister Incorporated. Hollister e logo e "Healthy skin. Positive outcomes." sono marchi di fabbrica di Hollister Incorporated. SH_L0_5004_5



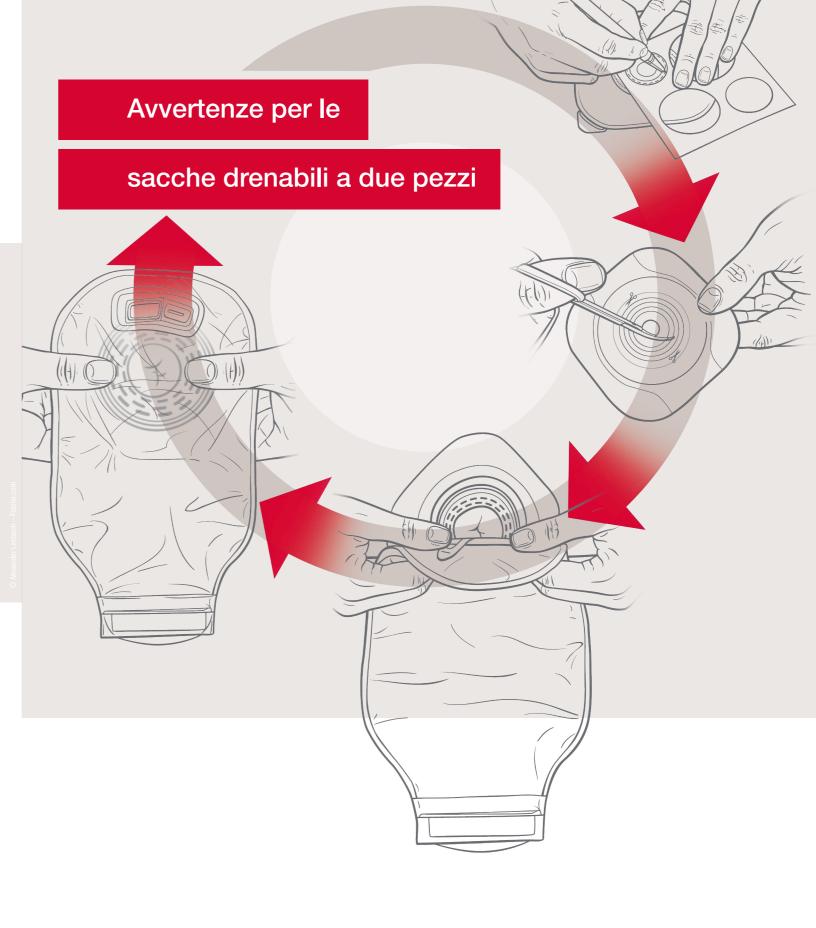



Il ricambio della sacca drenabile a due pezzi

Prima del ricambio, preparare tutto il materiale necessario. I foglietti promemoria rappresentati sul retro costituiscono un pratico ausilio.

1. Fasi preparatorie

Disegnare la forma dello stoma sulla pellicola di supporto della placca (1). Ritagliare l'apertura appropriata nella placca. Utilizzare se possibile delle forbicine curve (2). Chiudere la sacca ripiegando l'estremità dello scarico 3 volte in direzione della parte anteriore della sacca (3). Ripiegare la linguetta e premere le strisce di chiusura l'una sull'altra per tutta la lunghezza, fino a percepire la chiusura della sacca (4).









Suggerimento:

Le corrette dimensioni dell'apertura dello stoma sono importanti! Pertanto, bisogna misurare periodicamente il diametro dello stoma con la mascherina di misurazione Hollister e riportare il diametro dello stoma sulla pellicola di supporto della placca con l'ausilio di questa mascherina di misurazione.



2. Svuotamento e rimozione del sistema di raccolta

Svuotare la sacca prima di rimuoverla. A questo scopo, rilasciare la linguetta e aprire lo scarico della sacca (1). Premere contemporaneamente su entrambi i lati dello scarico per aprire la sacca (2). Ora il contenuto della sacca può essere facilmente svuotato nella toilette. Se non è ancora necessario cambiare il sistema, pulire l'interno dello scarico ad esempio con carta igienica e richiudere la sacca (3).

Per rimuovere la sacca, afferrare la linguetta di estrazione con una mano e con l'altra tenere saldamente la parte superiore della placca. Tirare lentamente la sacca verso il basso (4). Se non è ancora necessario rimuovere la placca, si può procedere subito al montaggio della nuova sacca (vedere punto 4, fig. 4). Se è necessario cambiare la placca, procedere come segue. Staccare prudentemente la placca dalla pelle, iniziando dal bordo superiore e tirandola lentamente dall'alto verso il basso, premendo lievemente contro la pelle intorno allo stoma (5). Smaltire i prodotti usati in un sacchetto e gettarli nei rifiuti domestici - non nel water!













3. Cura della cute e rasatura





Lavarsi le mani e pulire la pelle intorno allo stoma solo con acqua tiepida. Non usare oli, polveri, lozioni o saponi cremosi e asciugare la pelle (1). Una rasatura accurata ma prudente dell'area dello stoma è necessaria per una buona tenuta del sistema. Nella rasatura, coprire la mucosa dello stoma con una compressa e radere sempre allontanandosi dallo stoma (2), per evitare di danneggiarlo. Non usare creme depilatorie, perché possono causare allergie.

4. Applicazione del nuovo sistema di raccolta

Applicare la protezione cutanea solo su pelle pulita e asciutta. Se si utilizza un sistema senza bordo adesivo, rimuovere completamente la pellicola di supporto (1a). Se si utilizza un sistema con un bordo adesivo, rimuovere prima la pellicola di supporto dalla placca di protezione cutanea, lasciando per il momento la pellicola rimanente sul bordo adesivo (1b). Centrare l'apertura della protezione cutanea esattamente sullo stoma (2). Premere la protezione sulla pelle intorno allo stoma. Iniziare vicino allo stoma e finire agli angoli della protezione cutanea. Tenere la mano brevemente sullo stoma: il calore della mano e una lieve pressione favoriscono l'aderenza iniziale (3a). Se si utilizza un prodotto con un bordo adesivo, rimuovere ora il resto della carta protettiva dal bordo adesivo e premerlo delicatamente sulla pelle (3b).


















Placca senza bordo adesivo





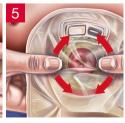

Placca con bordo adesivo

Posizionare il bordo dell'anello della sacca sull'anello di arresto della placca e premere le due parti saldamente l'una contro l'altra in un punto (4). Quindi, premere gradualmente entrambi gli anelli (anello di arresto e anello della placca) l'uno contro l'altro tutto intorno, fino a unire saldamente la placca con la sacca (5).