

L'urostoma

L'urostomia è una diversione urinaria artificiale e incontinente. Questa è necessario in caso di disturbi transitori o permanenti del trasporto dell'urina. La diversione urinaria è di solito situata nel piccolo bacino a destra o a sinistra.



© Hollister Incorporated

Che cosa occorre per il ricambio del sistema di raccolta:



- Penna
- Forbici per stomia con lame curve

- Nuovo sistema di raccolta
- Sacchetto per rifiuti per il sistema usato

- Compresse/fazzoletti
- Acqua calda per la detersione della pelle che circonda la stomia

Mascherina di misurazione, per misurare le dimensioni dello stomia

Eventuali accessori, quali ad es. anelli di protezione della cute o una cintura per lo stomia

Hollister Svizzera

Liberty Medical Switzerland AG
Bernstrasse 388
8953 Dietikon

Telefono: 0800 55 38 39 – numero gratuito
E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Indicazioni e uso previsto: Il sistema di raccolta per lo stomia viene utilizzato per raccogliere le escrezioni dallo stomia (es. urostomia) o da un'apertura cutanea (es. una ferita o una fistola).

AVVERTENZE Il riutilizzo di un prodotto monouso può portare a rischi (es. cattiva aderenza) per l'utente. Rigenerazione, detersione, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere il prodotto. Ciò può provocare odori sgradevoli o perdite. Accertarsi, seguendo le istruzioni, che il sistema di raccolta si adatti correttamente allo stomia. Il montaggio errato del sistema può causare infiltrazioni e danni alla pelle (es. irritazioni, screpolature, eruzioni o arrossamenti cutanei). Ciò può a sua volta accorciare la vita utile del sistema.

Osservazioni: Per un'aderenza ottimale, applicare il prodotto su pelle pulita, asciutta e integra. Non usare oli o lozioni. Questi prodotti possono compromettere l'aderenza del sistema. Un'eccessiva produzione di muco da un urostomia può causare una fuoriuscita inaspettata dalla sacca. L'adattamento ottimale del sistema dipende da molti fattori, come le condizioni e le escrezioni dello stomia, le condizioni cutanee e le forme corporee. Se si ha bisogno di assistenza per il sistema di raccolta o per irritazioni cutanee, rivolgersi all'infermiera competente o a un fornitore di assistenza sanitaria. In caso di lesioni gravi (eventi) legate all'uso del prodotto, rivolgersi al distributore locale o al produttore e alle autorità locali competenti. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.hollister.com/authority, o presso il rappresentante CE o il proprio distributore locale.

MD Dispositivo medico (se) applicabile
Prodotto senza lattice di gomma naturale



CE Prima dell'uso, si prega di leggere le istruzioni per l'uso per informazioni sull'uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni.
© 2021 Hollister Incorporated. Hollister e logo e "Healthy skin. Positive outcomes." sono marchi di fabbrica di Hollister Incorporated. SH_LO_5005_5

Avvertenze per le

sacche per urostomia monopezzo



© Alexander Lumbach - Fotolia.com

Il ricambio della sacca per urostomia monopezzo

Prima del ricambio, preparare tutto il materiale necessario. I foglietti promemoria rappresentati sul retro costituiscono un pratico ausilio.

1. Fasi preparatorie

Disegnare la forma dello stoma sulla pellicola di supporto della placca di protezione cutanea (1). Ritagliare l'apertura appropriata nella placca di protezione cutanea. Per evitare di tagliare la sacca, tirarla un po' lontana dalla placca di protezione cutanea. Utilizzare se possibile delle forbicine curve (2).



Suggerimento:

Le corrette dimensioni dell'apertura dello stoma sono importanti! Pertanto, bisogna misurare periodicamente il diametro dello stoma con la mascherina di misurazione Hollister e riportare il diametro dello stoma sulla pellicola di supporto della protezione cutanea con l'ausilio di questa mascherina di misurazione.




2. Svuotamento e rimozione della sacca per urostomia

Svuotare la sacca prima di rimuovere il sistema di raccolta. A questo scopo, mantenere la sacca con l'apertura della valvola di scarico nella toilette. Aprire con cautela la valvola di scarico di mezzo giro o finché l'urina non esce come desiderato (1). Dopo aver svuotato la sacca, richiudere la valvola (2). Avvertenza: La "goccia" rappresentata sulla valvola indica che la valvola è aperta e l'urina può uscire.

Rimuovere la sacca staccando delicatamente verso il basso il sistema dal bordo superiore della protezione cutanea, premendo lievemente contro la pelle intorno allo stoma (3). Smaltire i prodotti usati in un sacchetto e gettarli nei rifiuti domestici - non nel water!




3. Cura della cute e rasatura

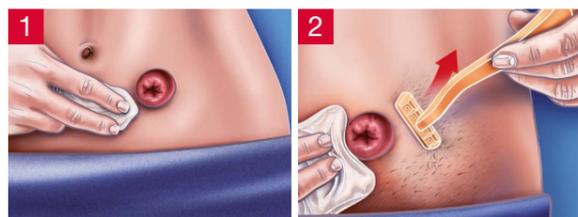


Lavarsi le mani e pulire la pelle intorno allo stoma solo con acqua tiepida. Non usare oli, polveri, lozioni o saponi cremosi e asciugare la pelle (1). Una rasatura accurata ma prudente dell'area dello stoma è necessaria per una buona tenuta del sistema. Nella rasatura, coprire la mucosa dello stoma con una compressa e radere sempre allontanandosi dallo stoma (2), per evitare di danneggiarlo. Non usare creme depilatorie, perché possono causare allergie.

4. Applicazione del nuovo sistema di raccolta

Prima di applicare la sacca, accertarsi che la valvola di scarico sia chiusa. Quando il sistema è posizionato, la "goccia" rappresentata sulla valvola non deve essere visibile (1). Applicare la protezione cutanea solo su pelle pulita e asciutta. Se si utilizza un sistema senza bordo adesivo, rimuovere completamente la pellicola di supporto (2a). Se si utilizza un sistema con un bordo adesivo, rimuovere prima la pellicola di supporto dalla placca di protezione cutanea, lasciando per il momento la pellicola rimanente sul bordo adesivo (2b). Centrare l'apertura della protezione cutanea esattamente sullo stoma (3). Premere la protezione sulla pelle intorno allo stoma (4a). Iniziare vicino allo stoma e finire agli angoli della protezione cutanea. Tenere la mano brevemente sullo stoma: il calore della mano e una lieve pressione favoriscono l'aderenza iniziale (4a). Se si utilizza un prodotto con un bordo adesivo, rimuovere ora il resto della carta protettiva dal bordo adesivo e premerlo delicatamente sulla pelle (4b).

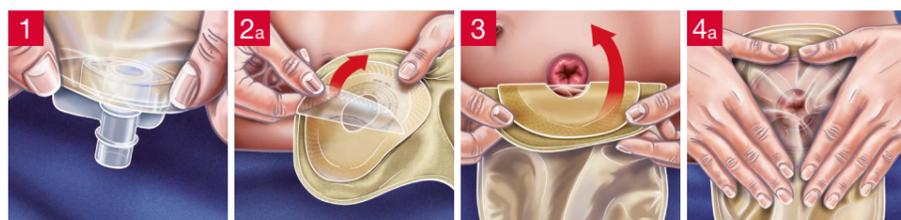

Senza bordo adesivo

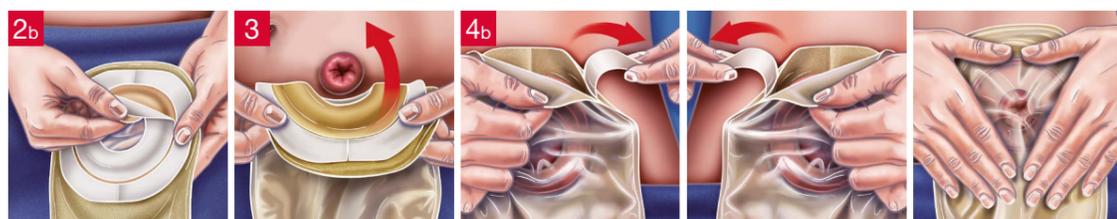

Con bordo adesivo