




VaPro

Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso



Il sistema urinario

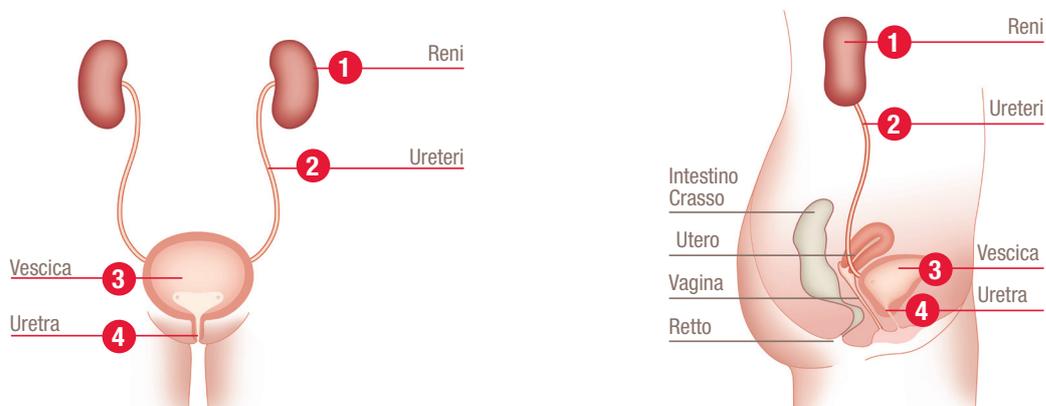

- 1 I reni hanno il compito di filtrare il sangue dagli scarti in esso contenuti e dai liquidi in eccesso.
- 2 Gli ureteri sono sottili tubicini che portano dai reni alla vescica.
- 3 La vescica è un organo cavo con una parete muscolare e due funzioni primarie, l'accumulo e lo smaltimento dell'urina. Lo svuotamento della vescica (detto anche minzione) comporta la coordinazione di muscoli sia volontari che involontari.
- 4 La funzione dell'uretra è drenare l'urina dalla vescica. Nelle donne, l'uretra è lunga circa 3-5 cm. L'urina quindi passa attraverso l'uretra e defluisce verso l'esterno.

Alcune posizioni suggerite per la cateterizzazione



Sulla sedia a rotelle



Utilizzando il wc



Hollister Svizzera
Bernstrasse 388
8953 Dietikon

044 730 45 05
info@hollister.ch

 Hollister



VaPro

Guida all'uso Femminile



1 Lavare le mani con acqua e sapone.



2 Aprire la confezione.



3 Aprire le labbra con due dita e detergere il meato uretrale e la zona circostante come è stato insegnato dall'operatore sanitario.



4 Rimuovere il tappo rosso di protezione.



5 Connettere il catetere ad una sacca di raccolta per le urine, o direzionare il cono di raccordo verso il wc.



6 Spingere la punta del catetere fino a posizionarlo all'interno della punta protetta.



7 Mantenere aperte le labbra. Impugnare il catetere dal serbatoio ed inserire la punta protetta fino a che la base del serbatoio non tocca il meato uretrale.



8 Inserire il catetere nell'uretra fino a che l'urina non comincia a defluire. Quando il flusso di urina si è fermato spingere ancora il catetere per circa 2 cm per assicurarsi che la vescica sia completamente vuota.



9 Gettate il catetere in un cestino per rifiuti. Non gettare il catetere nel wc.



10 Lavare le mani con acqua e sapone.

Note
