




VaPro

Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso




Il sistema urinario

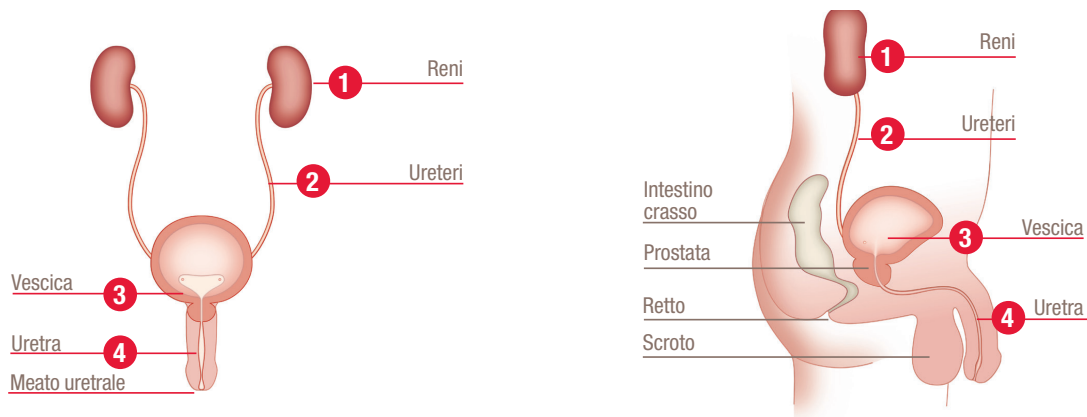

- 1 I reni hanno il compito di filtrare il sangue dagli scarti in esso contenuti e dai liquidi in eccesso.
- 2 Gli ureteri sono sottili tubicini che portano dai reni alla vescica.
- 3 La vescica è un organo cavo con una parete muscolare e due funzioni primarie, l'accumulo e lo smaltimento dell'urina. Lo svuotamento della vescica (detto anche minzione) comporta la coordinazione di muscoli sia volontari che involontari.
- 4 L'urina quindi passa attraverso l'uretra e defluisce verso l'esterno.

Alcune posizioni suggerite per la cateterizzazione

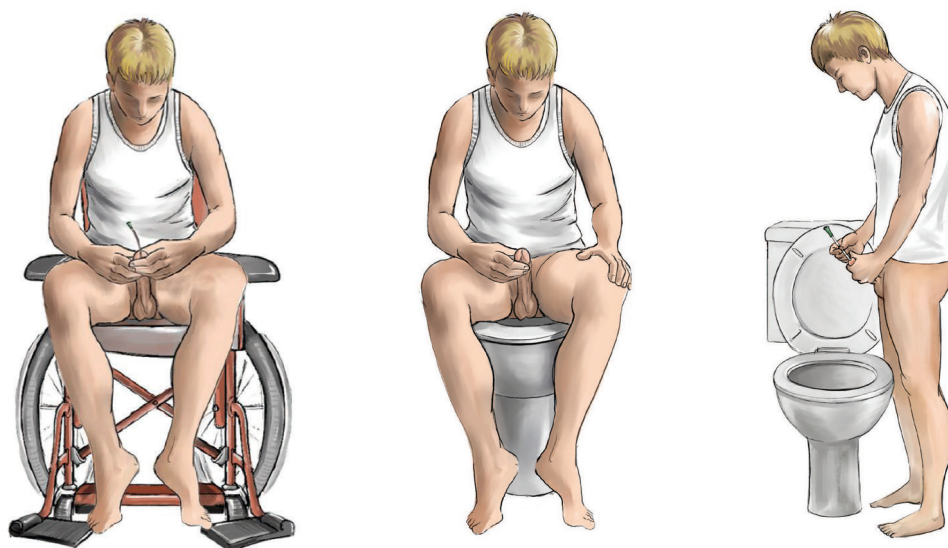

La cateterizzazione può essere eseguita in diverse posizioni a seconda della necessità e mobilità personale

Hollister Svizzera
Bernstrasse 388
8953 Dietikon

044 730 45 05
info@hollister.ch

 **Hollister**



VaPro


Guida all'uso



1 Lavare le mani con acqua e sapone.




2 Aprire la confezione.

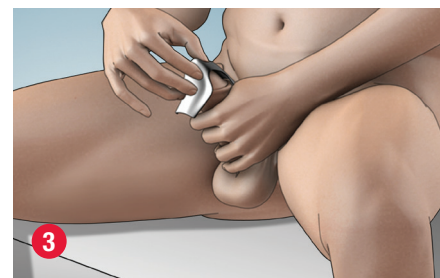

3 Tirare indietro il prepuzio e detergere il glande con un sapone delicato oppure con una salvietta non contenente alcool.




4 Rimuovere il tappo rosso di protezione.

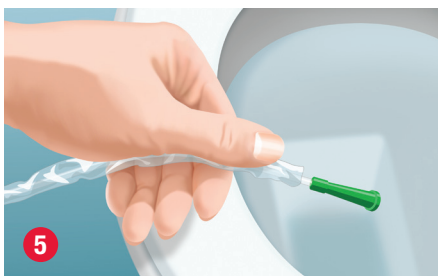


5 Connettere il catetere ad una sacca di raccolta per le urine, o direzionare il cono di raccordo verso il wc.



6 Spingere la punta del catetere fino a posizionarlo all'interno della punta protetta.

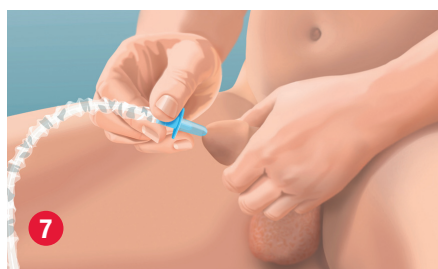

7 Spostare delicatamente indietro il prepuzio e sollevare il pene. Impugnare il catetere dal serbatoio ed inserire la punta protetta fino a che la base del serbatoio non tocca il meato uretrale. catetere.

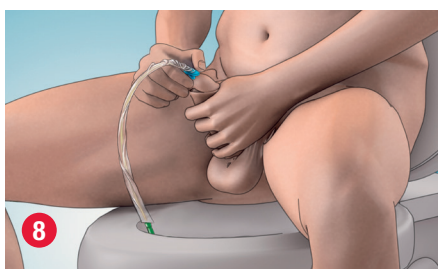

8 Continuare con l'inserimento del catetere facendolo scorrere a fisarmonica attraverso il film di protezione fino a quando l'urina non comincia a defluire. Rimuovere lentamente il catetere per qualche cm per assicurarsi che la vescica sia completamente vuota. Una volta che il flusso di urina è terminato completamente, riportare il pene verso l'alto ed estrarre lentamente il catetere.



9 Gettare il catetere in un cestino per rifiuti. Non gettare il catetere nel wc.



10 Lavare le mani con acqua e sapone.

Note
