



Infyna.
Ein neue Erfahrung.



Infyna™
Intermittierender Einmalkatheter


 Hollister®

Kontinenzversorgung

Infyna™

Wir haben Ihnen zugehört und einen Katheter entwickelt,
der Ihren Bedürfnissen Rechnung trägt.

Der hydrophile Infyna Einmalkatheter bietet die optimale Balance zwischen Flexibilität und Festigkeit für ein sanftes Katheterisieren.

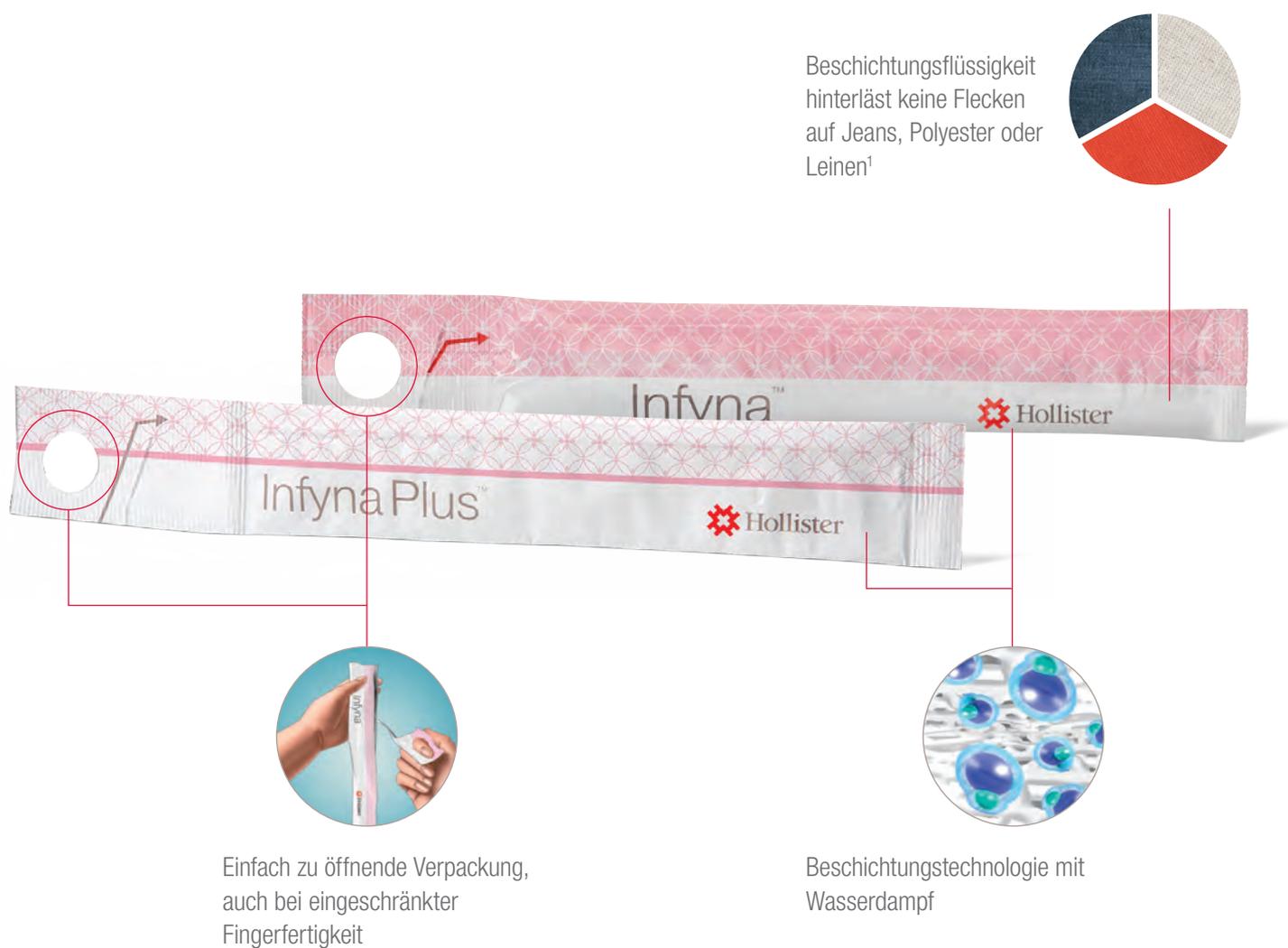

Einfaches Einführen und Entfernen

- **Gebrauchsfertig:**

Die innovative Wasserdampftechnologie sorgt für eine gleichmässige Beschichtung dank sterilen Wasserdampfmolekülen. Sofortige Gebrauchsfähigkeit ohne Zugabe von Wasser ist das Resultat.

- **Einfaches Katheterisieren:**

Die Balance zwischen Flexibilität und Festigkeit sorgt für ein kontrolliertes Katheterisieren.

- **Atraumatische Katheteraugen:**

Die mit Ultrasound-Technik ausgeschnittenen Katheteraugen sorgen für ein sanftes Einführen und Entfernen des Katheters.

Ableitungstrichter, geeignet für das Befestigen von Urinbeuteln, bietet eine gute Kontrolle während des Katheterisierens

Atraumatische Katheteraugen sorgen für eine sanfte und sichere Anwendung und helfen, das Risiko traumatischer Verletzungen der Harnröhre beim Einführen und Entfernen des Katheters zu reduzieren



Integrierter Auffangbeutel mit 1000 ml Fassungsvermögen



Integrierte Rücklaufsperr

Dieser Einmalkatheter ist ein biegsames, röhrenförmiges Hilfsmittel, das bei männlichen, weiblichen und pädiatrischen Patienten, bei denen Urin aus der Blase abgeleitet werden muss, durch die Harnröhre eingeführt wird.

- Gebrauchsfertiger Einmalkatheter
- Hydrophil beschichteter, phthalatfreier Katheter
- 2 sanfte, abgerundete Katheteraugen
- Farbcodierter Ableitungstrichter
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Warnhinweis: Um dem Infektionsrisiko oder anderen Komplikationen vorzubeugen, darf dasselbe Produkt nicht mehrmals verwendet werden.

Warnhinweis: Wenn eine der folgenden Indikationen auftritt, suchen Sie bitte vor dem Gebrauch dieses Produktes den Arzt auf:

- Harnröhrenriss
- Ungeklärte Blutung aus der Harnröhre
- Ausgeprägte Harnröhrenstriktur
- Via falsa
- Urethritis - Entzündung der Harnröhrenschleimhaut
- Prostatitis – Entzündung der Prostata
- Epididymitis – Entzündung des Nebenhodens

Selbstkatheterismus sollte dem Behandlungsplan und der Empfehlung Ihres Arztes folgen und in Übereinstimmung mit der gegebenen Gebrauchsanleitung durchgeführt werden. Da die Häufigkeit der Katheterisierung bei jeder Person anders ist, sollte Ihr Arzt eine Empfehlung über die Häufigkeit Ihrer Katheterisierung abgeben. Sollten Sie andere Fragen zu Ihrer Katheterisierung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Bitte beachten Sie: Lagern Sie alle Katheterboxen in horizontaler Lage bei normaler Raumtemperatur.

Dieses Produkt besteht aus: Trichter aus Polyvinylchlorid, dem phthalatfreiem Schlauch, Auffangbeutel aus Polyurethan.

Referenzen

1. Analyse des Potentials zur Fleckenbildung bei Tropfen für Onli und Wettbewerbsprodukte. Hollister 2015.

	Charrière	Artikelnummer	Pharmacode	Packungsinhalt
Infyna™ gebrauchsfertiger, hydrophiler Einmalkatheter MiGeL / LiMA / EMAP: 15.10.05.00.1	8 Ch	88081	6975493	25
	10 Ch	88101	6975501	25
	12 Ch	88121	6975518	25
	14 Ch	88141	6975524	25
Infyna Plus™ gebrauchsfertiger, hydrophiler Einmalkatheter mit Auffangbeutel MiGeL / LiMA / EMAP: 15.10.06.00.1	8 Ch	86081	6975547	25
	10 Ch	86101	6975530	25
	12 Ch	86121	6975553	25
	14 Ch	86141	6975576	25

Hollister Schweiz

Bernstrasse 388
8953 Dietikon

www.hollister.ch

Bestellung:

Telefon: 044 730 45 05
Telefax: 044 730 54 44

Mo. – Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch

Beratung:

Telefon: 0800 55 38 39
(gebührenfrei)

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen.

Hollister und Logo sowie Infyna und Infyna Plus sind Warenzeichen von Hollister Incorporated.
© 2021 Hollister Incorporated.
05.21

Medizinprodukte, die innerhalb der Schweiz und der EU

vertrieben werden, sind mit  gekennzeichnet.

