

Gebrauchsanweisung für VaPro Pocket™ Einmalkatheter



1. Legen Sie alle Materialien bereit, die Sie für das Katheterisieren benötigen.

2. Waschen Sie Ihre Hände gemäß den Anweisungen Ihres medizinischen Fachpersonals.

3. Nehmen Sie Ihre Position für die Durchführung der intermittierenden Katheterisierung ein. Öffnen Sie Ihre Kleidung so weit, dass Sie gut an Ihre Genitalien herankommen.




4. Zum Öffnen der Verpackung ziehen Sie das vorgestanzte Fingerloch zu sich und bis ganz nach unten.

5. Entnehmen Sie den Katheter aus der Verpackung. Legen Sie die Packung auf den Schoß, das Waschbecken oder auf eine andere ebene Fläche. Legen Sie nun den Katheter auf die geöffnete Verpackung.




6. Halten Sie den Penis mit Ihrer nicht dominanten Hand bis zum Ende des Katheterisierens fest. Ziehen Sie die Vorhaut (falls vorhanden) zurück und reinigen Sie die Eichel gemäß den Anweisungen Ihres medizinischen Fachpersonals.

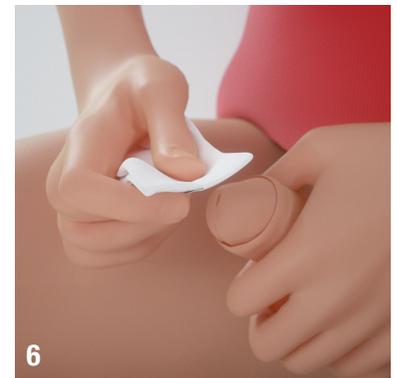

7. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Schutzhülse des Katheters.

8. Nehmen Sie den Katheter in eine Hand und schieben Sie den Katheter vor, bis die Katheterspitze die Schutzhülse ausfüllt. Achten Sie darauf, dass der Katheter nicht aus der Hülse herausragt.

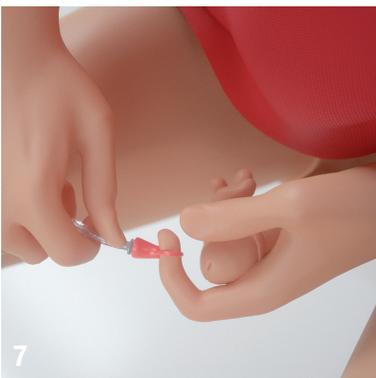


9. Greifen Sie den Katheter unterhalb des Tellers der Schutzhülse.



VaPro Pocket™
Berührungsfreie intermittierende Einmalkatheter



10. Drücken Sie mit den Fingern und dem Zeigefinger Ihrer nicht dominanten Hand vorsichtig die Eichel zusammen, um den Harnröhreneingang zu öffnen. Führen Sie mit Ihrer dominanten Hand die Schutzhülse ein, bis der Teller die Harnröhrenöffnung berührt.

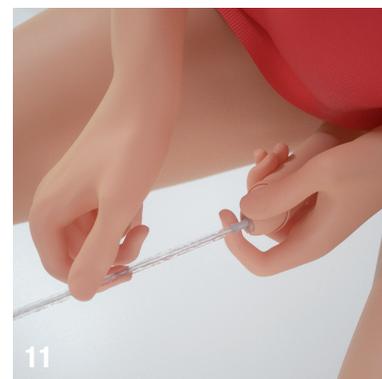

11. Den Katheter einführen und vorschieben, bis der Urin anfängt zu fließen.



12. Nachdem der Urinfluss aufgehört hat, ziehen Sie den Katheter langsam zurück. Falls der Urin erneut fließt, warten Sie bis der Urinfluss endet. Wenn Sie sicher sind, dass die Harnblase leer ist, entfernen Sie den Katheter vollständig. Schieben Sie die Vorhaut (falls vorhanden) wieder über die Eichel.

13. Entsorgen Sie den Katheter und die Verpackung in einem Abfalleimer. **ENTSORGEN SIE IHN NICHT IN DER TOILETTE.**



14. Waschen Sie Ihre Hände.

WARNHINWEIS: Um dem Infektionsrisiko oder anderen Komplikationen vorzubeugen, darf dasselbe Produkt nicht mehrmals verwendet werden.

WARNHINWEIS: Sollten Beschwerden oder Zeichen einer Traumatisierung der Harnröhre auftreten, brechen Sie den Gebrauch bitte umgehend ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- Gebrauchsfertiger Einmalkatheter
- Schutzhülse und Folie begünstigen ein berührungsfreies Einführen
- Farbcodierter Ableitungstrichter
- Hydrophil beschichteter phthalatfreier Katheter
- 2 sanfte, abgerundete Augen
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

GEBRAUCHSHINWEISE

Dieser Einmalkatheter ist ein biegsames röhrenförmiges Hilfsmittel, das bei männlichen, weiblichen und pädiatrischen Patienten, bei denen Urin aus der Blase abgeleitet werden muss, durch die Harnröhre eingeführt wird.

VORSICHTSMAßNAHMEN: Wenn eine der folgenden Indikationen auftritt, suchen Sie bitte vor Gebrauch dieses Produktes den Arzt auf:

- Harnröhrenriss
- Ausgeprägte Harnröhrenstriktur
- Urethritis - Entzündung der Harnröhrenschleimhaut
- Epididymitis - Entzündung des Nebenhodens
- Ungeklärte Blutung aus der Harnröhre
- Via falsa
- Prostatitis - Entzündung der Prostata

VORSICHTSMAßNAHMEN: Selbstkatheterismus sollte den Behandlungsplan und die Empfehlung Ihres Arztes befolgen und in Übereinstimmung mit der gegebenen Gebrauchsanleitung durchgeführt werden. Da die Häufigkeit der Katheterisierung bei jeder Person anders ist, sollte Ihr Arzt eine Empfehlung über die Häufigkeit Ihrer Katheterisierung abgeben. Sollten Sie andere Fragen über Ihre Katheterisierung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Bitte beachten Sie: Lagern Sie alle Katheterboxen in horizontaler Lage bei normaler Raumtemperatur. Dieses Produkt besteht aus: Polyurethanfolie, thermoplastischer Elastomerspitze und einem Schlauch, der kein DEHP enthält.

Deutschland
Hollister Incorporated
 Riesstraße 25
 D-80992 München
 beratungsteam@hollister.com
 www.hollister.de
 Tel: 0800 1015023 (gebührenfrei)

Österreich
Hollister GmbH
 Bergmillergasse 5/1/1
 A-1140 Wien
 hollister.oesterreich@hollister.com
 www.hollister.at
 Tel: +43 1 87708000

Schweiz
Hollister
 Bernstrasse 388
 CH-8953 Dietikon
 info@hollister.ch
 www.hollister.ch
 Tel: 0800 55 38 39 (gebührenfrei)

