




VaPro

Berührungsfreier, hydrophiler Einmalkatheter




Der Harntrakt

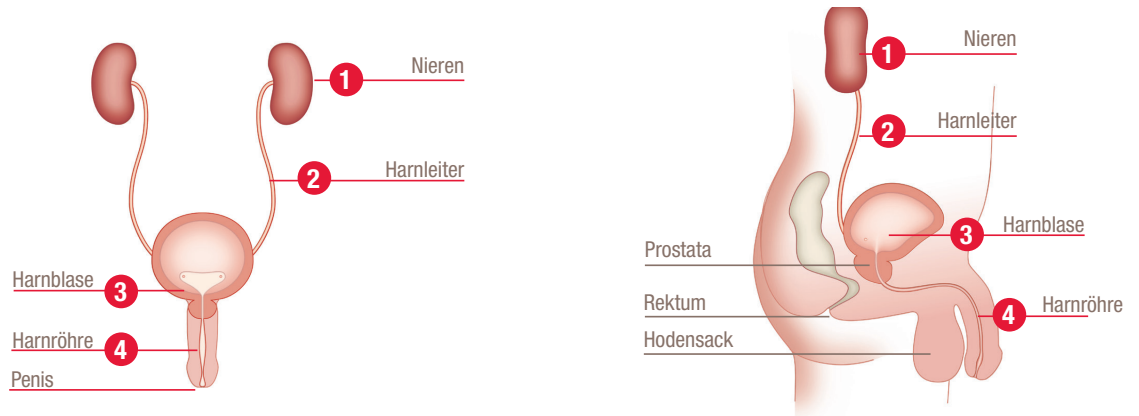

- 1 Die Nieren haben die Aufgabe, Abfallprodukte aus dem Blut zu filtern und daraus Urin zu bilden.
- 2 Die Harnleiter führen den Urin in die Blase.
- 3 Die Blase ist ein Hohlorgan mit einer Muskelwand (Detrusor). Ihre zwei Funktionen sind das Speichern und Entleeren des Urins. Damit es zur Entleerung der Blase kommt, ist ein Zusammenspiel von Blase und Schliessmuskeln sowie ein intaktes Nervensystem nötig.
- 4 Der Urin wird über die Harnröhre aus dem Körper geleitet.

Mögliche Positionen zum Katheterisieren

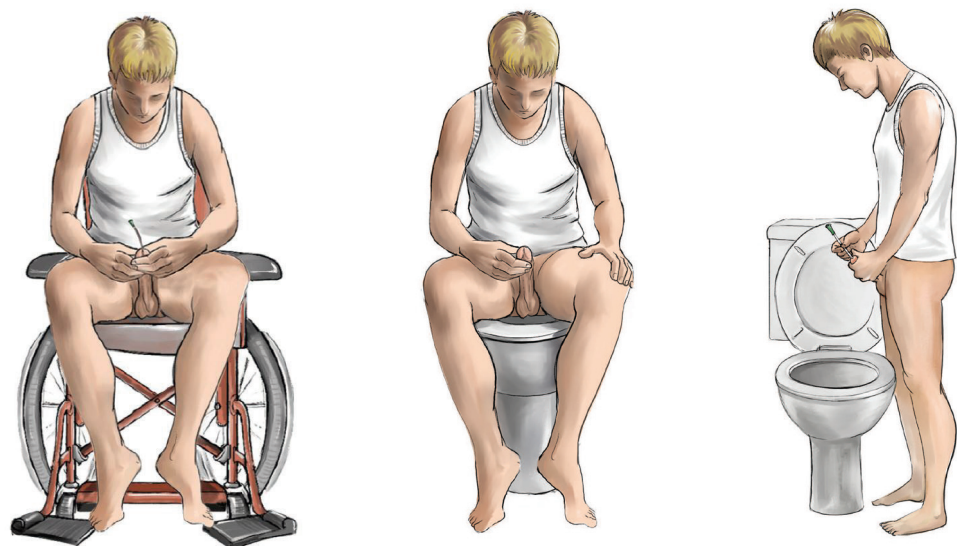

Hollister Schweiz
Bernstrasse 388
8953 Dietikon

044 730 45 05
info@hollister.ch

 Hollister



VaPro


Gebrauchsanweisung



1 Waschen Sie die Hände mit einer milden Seife und Wasser.



2 Öffnen Sie die Verpackung. Stecken Sie Ihre Zeigefinger durch die Fingeröffnungen und ziehen Sie die Verpackung entlang dem Pfeil nach unten auf.

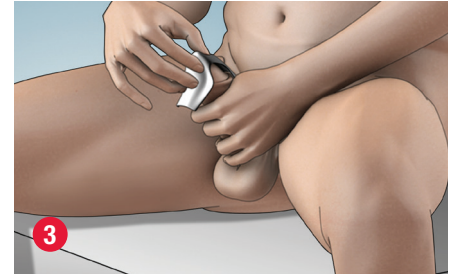

3 Schieben Sie die Vorhaut zurück und reinigen Sie die Eichel und den Harnröhreneingang mit einer milden, nicht parfümierten Seife oder nicht alkoholischen, feuchten Reinigungstücher. Desinfizieren Sie den Bereich anschliessend.




4 Entfernen Sie die rote Schutzkappe.




5 Bevor Sie den Katheter einführen, richten Sie das Ende des Katheters in ein Auffanggefäss oder eine Toilette. Alternativ können Sie auch einen Urinbeutel an den farbigen Trichter anschliessen.




6 Halten Sie den Katheter in einer Hand und schieben Sie den Katheter nach vorne, bis dessen Spitze in der Schutzhülse steckt.

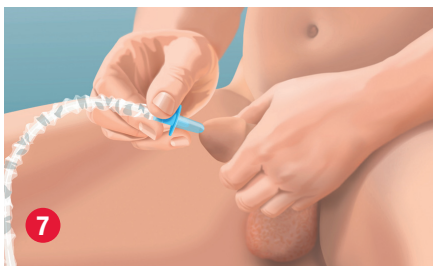

7 Greifen Sie den Katheter unterhalb des Schutzhülseentellers und führen Sie die Schutzhülse vollständig in die Harnröhre ein, bis der Teller in Kontakt mit der Harnröhrenöffnung kommt.

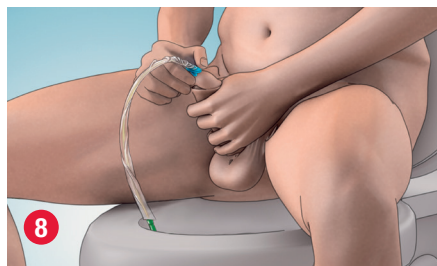

8 Schieben Sie den Katheter in die Harnröhre, bis der Urin zu fließen beginnt. Nach Ende des Urinflusses ziehen Sie den Katheter langsam zurück, damit auch der restliche, noch verbliebene Urin aus der Blase entleert wird. Entfernen Sie dann den Katheter vollständig.

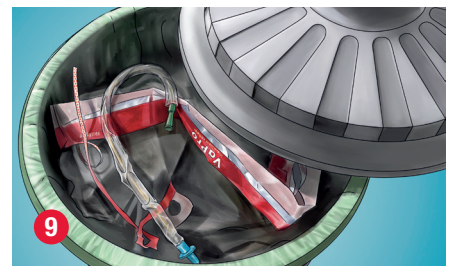

9 Entsorgen Sie den Katheter in einem Abfalleimer. Spülen Sie ihn nicht die Toilette hinunter.



10 Waschen Sie die Hände mit einer milden Seife und Wasser.

Notizen
