



VaPro Pocket™



Sicherheit – Einfachheit – Lebensqualität Sécurité – Simplicité – Qualité de vie



VaPro Pocket



VaPro Plus



VaPro

WARNHINWEIS

Um dem Infektionsrisiko oder anderen Komplikationen vorzubeugen, darf dasselbe Produkt nicht mehrmals verwendet werden. Sollten Beschwerden oder Zeichen einer Traumatisierung der Harnröhre auftreten, brechen Sie den Gebrauch bitte umgehend ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- Gebrauchsfertiger, beschichteter Einmalkatheter
- Latexfrei
- Schutzhülse und Folie begünstigen ein berührungsfreies Einführen
- 2 sanfte, abgerundete Augen
- Farbcodierter Ableitungstrichter

Dieser Einmalkatheter ist ein biegsames, röhrenförmiges Hilfsmittel, das bei männlichen, weiblichen und pädiatrischen Patienten, bei denen Urin aus der Blase abgeleitet werden muss, durch die Harnröhre eingeführt wird.

Selbstkatheterismus sollte dem Behandlungsplan und der Empfehlung Ihres Arztes folgen und in Übereinstimmung mit der gegebenen Gebrauchsanleitung durchgeführt werden. Da die Häufigkeit der Katheterisierung bei jeder Person anders ist, sollte Ihr Arzt eine Empfehlung über die Häufigkeit Ihrer Katheterisierung abgeben. Sollten Sie andere Fragen zu Ihrer Katheterisierung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Bitte beachten Sie: Lagern Sie alle Katheterboxen in horizontaler Lage bei normaler Raumtemperatur.

AVERTISSEMENTS

Afin d'aider à réduire le risque d'infections urinaires et/ou autres complications, ne pas réutiliser les sondes.

- Sonde pour autosondage intermittent auto lubrifiée à usage unique
- Absence de latex
- Technique No Touch avec la gaine protectrice et le guide d'insertion
- 2 oeillets atraumatiques
- Code couleur au niveau du godet

Cette sonde pour autosondage intermittent est un dispositif tubulaire souple qui est inséré par l'urètre pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont besoin de vidanger l'urine de leur vessie.

L'autosondage ne doit être pratiqué qu'après avis médical et prescription, en respectant les instructions. Il faut toujours suivre les conseils donnés par le professionnel de santé. Comme la fréquence de sondage varie selon les personnes, la fréquence recommandée de sondage doit être fournie par votre professionnel de santé. Pour toute question par rapport à l'autosondage, veuillez consulter votre médecin.

Notes : Conserver les boîtes à plat et à température ambiante.

Hollister (Schweiz)

Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung

Telefon 0800 55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung

Telefon 044 730 45 05
Telefax 044 730 54 44
Mo – Do 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr
Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr

info@hollister.ch www.hollister.ch

Hollister (Suisse)

Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon


Conseils

Téléphone 0800 55 38 39 – ligne gratuite

Commandes

Téléphone 044 730 45 05
Télécopie 044 730 54 44
Lu à jeu 08.00 – 12.00 et 13.30 – 17.00
Ven 08.00 – 12.00 et 13.30 – 16.00

info@hollister.ch www.hollister.ch

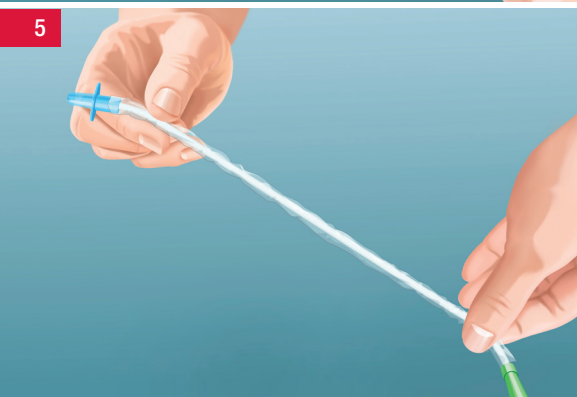


Greifen Sie den Katheter gleichzeitig an beiden Enden und ziehen sie leicht, um die aufgerollte Form des Katheters zu lösen.

Richten Sie das Ende des Katheters in ein Auf-
fanggefäß oder eine Toilette. Beachten Sie dabei
die natürliche Krümmung des Katheters.

Saisissez la sonde simultanément aux deux ex-
trémités.

Dirigez la sonde vers la cuvette des toilettes.
Faites attention à la courbure naturelle du sonde.

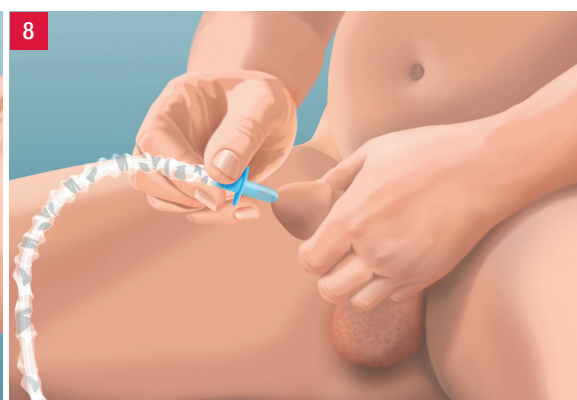

Greifen Sie den Katheter unterhalb des Schutz-
hülseentellers und führen Sie die die Schutzhülse
vollständig in die Harnröhre ein, bis der Teller Kon-
takt mit der Harnröhrenöffnung hat. Beim Einfüh-
ren des Katheters ist darauf zu achten, die Position
der Schutzhülse nicht zu verändern.

Pincez le bout de la verge pour ouvrir le méat.
Insérez le guide d'insertion puis faites progresser
la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie (vous sau-
rez que vous y êtes quand l'urine commencera à
couler). Retirez la sonde doucement et remettez
le prépuce en position normale.



Beratung und Produktmuster unter der gebührenfreien Telefonnummer **0800 55 38 39**
Conseils et échantillons au numéro vert **0800 55 38 39**