




# VaPro Plus Pocket

Sonde hydrophile à usage unique



## Le système urinaire masculin

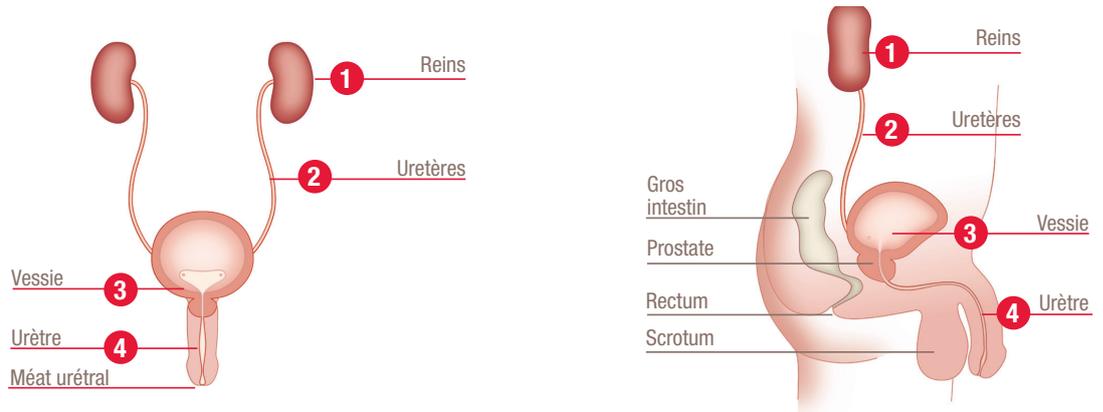

- 1 Les reins filtrent les déchets du sang et produisent l'urine.
- 2 L'urine est transportée des reins vers la vessie par les uretères.
- 3 Les deux principales fonctions de la vessie sont le stockage et la vidange des urines. La vidange de la vessie implique la coordination de muscles volontaires et de muscles autonomes et nécessite un système nerveux intact.
- 4 L'urine passe alors dans l'urètre et est expulsée en dehors du corps.

## Positions possibles pour la pratique de l'autosondage



Assis sur la chaise roulante, devant les toilettes, en faisant basculer le bassin en avant.



Assis sur les toilettes.



Debout, à côté ou devant les toilettes.

Hollister Suisse  
Bernstrasse 388  
8953 Dietikon

044 730 45 05  
info@hollister.ch

 Hollister



# VaPro Plus Pocket

## Mode d'emploi homme



1

Lavez-vous les mains.



2

Ouvrez l'emballage en tirant doucement vers le bas sur le fil d'ouverture.



3

Nettoyez le méat urinaire de haut en bas à l'eau et au savon ou avec une lingette humide ou avec du désinfectant comme enseigné par votre équipe soignante.




4

Enlevez le capuchon.



5

Poussez la sonde dans la gaine protectrice, sans la faire sortir de la gaine.

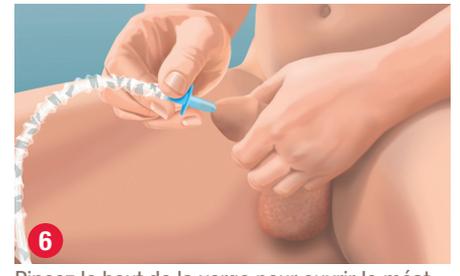

6

Pincez le bout de la verge pour ouvrir le méat.



7

Insérez la gaine protectrice puis faites progresser la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie. Laissez s'écouler l'urine. Retirez la sonde doucement.



8

Afin de vider le sachet, déchirez au niveau de l'encoche. Videz l'urine dans les toilettes ou dans un dispositif de recueil approprié.



9

Jetez la sonde dans un endroit approprié.



10

Lavez-vous les mains.

### Notes

---

---

---

---