




VaPro Plus Pocket

Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso




Il sistema urinario

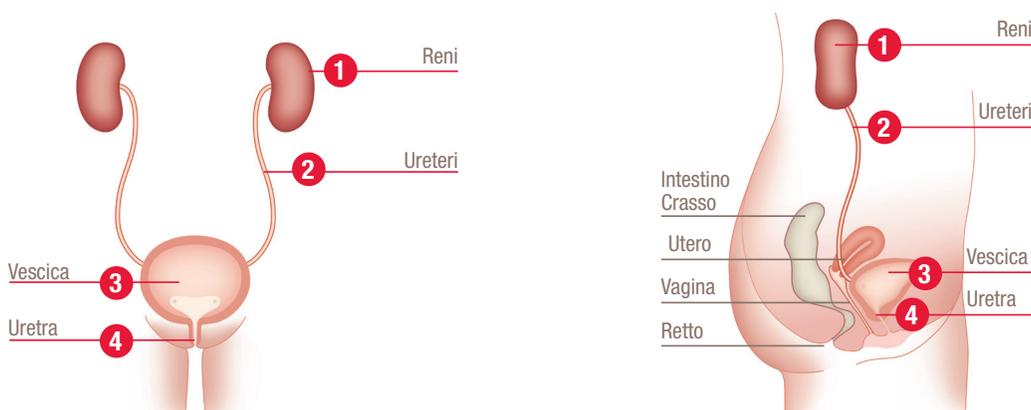

- 1 I reni hanno il compito di filtrare il sangue dagli scarti in esso contenuti e dai liquidi in eccesso.
- 2 Gli ureteri sono sottili tubicini che portano dai reni alla vescica.
- 3 La vescica è un organo cavo con una parete muscolare e due funzioni primarie, l'accumulo e lo smaltimento dell'urina. Lo svuotamento della vescica (detto anche minzione) comporta la coordinazione di muscoli sia volontari che involontari.
- 4 La funzione dell'uretra è drenare l'urina dalla vescica. Nelle donne, l'uretra è lunga circa 3-5 cm. L'urina quindi passa attraverso l'uretra e defluisce verso l'esterno.

Alcune posizioni suggerite per la cateterizzazione

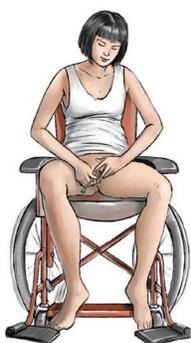

Sulla sedia a rotelle



Utilizzando il wc



Hollister Svizzera
Bernstrasse 388
8953 Dietikon

044 730 45 05
info@hollister.ch

 Hollister



VaPro Plus Pocket

Guida all'uso Femminile



1

Lavare le mani con acqua e sapone.



2

Aprire la confezione.



3

Aprire le labbra con due dita e detergere il meato uretrale e la zona circostante come è stato insegnato dall'operatore sanitario.




4

Rimuovere il tappo rosso di protezione.



5

Spingere la punta del catetere fino a posizionarlo all'interno della punta protetta.

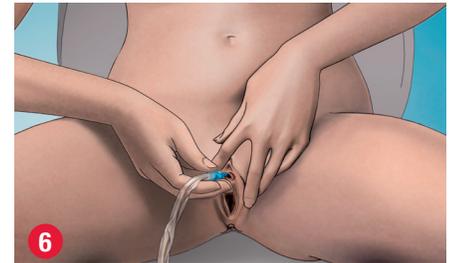

6

Mantenere aperte le labbra. Impugnare il catetere dal serbatoio ed inserire la punta protetta fino a che la base del serbatoio non tocca il meato uretrale. Mantenere la punta in posizione e rilasciare le labbra continuando a sorreggere il serbatoio fino a che il catetere non sarà passato attraverso l'uretra in vescica.



7

Inserire il catetere nell'uretra fino a che l'urina non comincia a defluire. Quando il flusso di urina si è fermato spingere ancora il catetere per circa 2 cm per assicurarsi che la vescica sia completamente vuota.



8

Strappare la sacca all'altezza del punto di pre-taglio e svuotare il contenuto nel wc.



9

Gettare il catetere in un cestino per rifiuti. Non gettare il catetere nel wc.



10

Lavare le mani con acqua e sapone.

Note
