


Catetere VaPro Pocket™ istruzioni per l'uso




1. Montare l'intera apparecchiatura e preparare l'area.
2. Lavarsi le mani secondo le indicazioni dell'operatore sanitario.
3. Posizionarsi in maniera tale da eseguire la procedura di cateterismo intermittente. Slacciare gli indumenti in modo tale da avere accesso ai genitali.
4. Per aprire la confezione, tirare l'apposito anello verso di sé e completamente verso il basso.
5. Estrarre il catetere dalla confezione. Lasciare la confezione sul grembo, sul lavabo o su una superficie piana. Appoggiare il catetere sulla confezione aperta.
6. Con la mano non dominante, mantenere il pene fino al termine della procedura. Ritrarre il prepuzio (se presente) e detergere il glande, secondo le istruzioni fornite dell'operatore sanitario.
7. Rimuovere il tappo dalla punta di protezione del catetere.
8. Con una mano mantenere il catetere, con l'altra farlo avanzare fino a quando la sua punta non sia inserita tutta all'interno della punta di protezione, facendo attenzione a non far sporgere il catetere dalla punta.
9. Afferrare il catetere al di sotto della placca della punta di protezione.

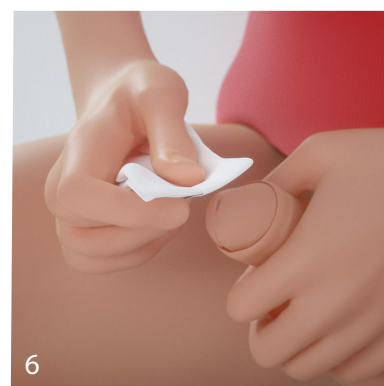

VaPro Pocket™
Catetere intermittente No Touch



10. Con le dita della mano non dominante esercitare una delicata pressione sul pene, in modo tale da aprire l'apertura dell'uretra. Con la mano dominante inserire la punta di protezione fino a quando la placca non entri in contatto con l'apertura dell'uretra.

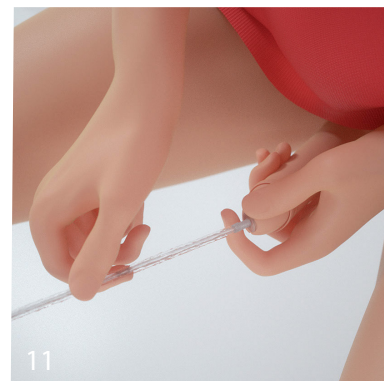

11. Inserire il catetere fino quando l'urina non inizia a fluire.



12. Quando il flusso dell'urina si è arrestato, estrarre lentamente il catetere. Se il flusso continua, attendere fino al suo arresto. Dopo essersi accertati che la vescica è vuota, rimuovere completamente il catetere. Riposizionare il prepuzio (se presente).

13. Smaltire il catetere e la confezione nell'apposito contenitore di raccolta. Non gettare il catetere nel wc.

14. Lavare le mani.



AVVERTENZE: Per aiutare a ridurre la possibilità di infezioni e/o altre complicanze, non riutilizzare.

AVVERTENZE: In caso di evidente disagio o di qualsiasi segnale di trauma interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il proprio operatore sanitario di riferimento.

- Catetere pronto all'uso per cateterismo ad intermittenza monouso • Catetere privo di ftalati ricoperto con rivestimento idrofilico • La punta protetta e la guaina di protezione permettono l'inserimento con tecnica no-touch • 2 occhielli atraumatici • Diametri identificabili con codice colore • Realizzato senza lattice di gomma naturale

INDICAZIONI PER L'USO

Questo catetere a intermittenza è un dispositivo tubolare flessibile che viene inserito nell'uretra di pazienti sia adulti che pediatrici di sesso maschile e femminile allo scopo di drenare l'urina dalla vescica.

PRECAUZIONI: Rivolgersi al proprio operatore sanitario di riferimento prima di effettuare il cateterismo se si verifica una delle seguenti situazioni:

- Uretra lesionata • Sanguinamento dell'uretra • Restringimento pronunciato dell'uretra • False vie • Uretriti – infiammazioni dell'uretra
- Prostatite – infiammazione della prostata • Epididimite – infiammazione dell'epididimo

PRECAUZIONI: L'autocateterismo deve essere praticato secondo il piano di cura e i consigli dell'operatore sanitario di riferimento. Seguire sempre le istruzioni per l'uso fornite. Poiché la frequenza di cateterizzazione varia da persona a persona, la frequenza raccomandata di cateterizzazione dovrebbe essere fornita da un operatore sanitario di fiducia. Per qualunque domanda relativa alla cateterizzazione la preghiamo di contattare il suo operatore sanitario di fiducia.

NOTA: conservare le confezioni in posizione orizzontale ed a temperatura ambiente. Questo prodotto è composto da: film di protezione in poliuretano, punta protetta in termoplastica elastomerica e corpo esente da DEHP.

Hollister | Liberty Medical Switzerland AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf
0800 55 38 39
info@hollister.ch
www.hollister.ch