


# Adapt Anneau Protecteur

## Accessoire

- Il comble les irrégularités autour de la stomie.
- Il renforce l'étanchéité et prévient le risque de fuites.
- Il soulage la peau sensible autour de la stomie.

### Comment l'utiliser ?

- 1 **Sortez l'anneau de son emballage** et retirez les films protecteurs
- 2 **Ajustez l'anneau protecteur** avec vos doigts pour lui donner la taille, la forme et l'épaisseur souhaitées. Pour cela, vous pouvez :
  - A **Etirer**
  - B **Couper et ajuster**
  - C **Aplanir les bords**
  - D **Superposer pour créer un anneau plus petit**
- 3 **Placez l'anneau protecteur** autour de la stomie ou sur l'appareillage.
- 4 **Maintenez** plusieurs secondes en place.
- 5 **Positionnez** votre appareillage comme à votre habitude.

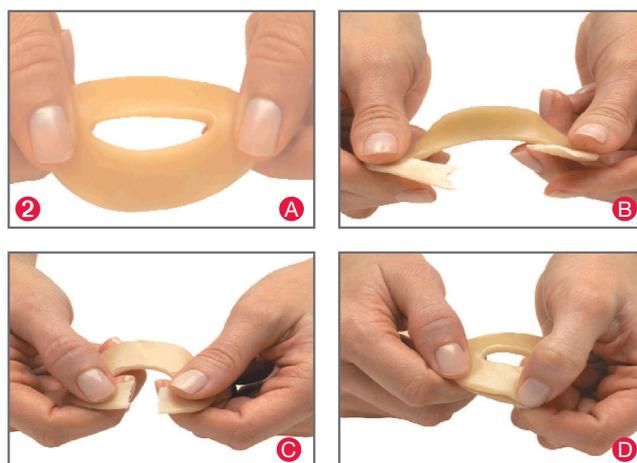

### Questions fréquemment posées

<b>Puis-je l'utiliser si ma peau est irritée ?</b>	Sa formule sans alcool supprime tout risque de picotement. La formule enrichie de l'anneau CeraRing aide à renforcer les défenses naturelles.
<b>Quelle est la spécificité de CeraRing ?</b>	L'anneau CeraRing est enrichi en céramide ce qui permet de maintenir la peau en bonne santé.
<b>Comment puis-je le retirer ?</b>	Il se retire simplement lors du changement de l'appareillage. Si besoin, vous pouvez aussi utiliser une lingette pour retrait d'adhésif Adapt.



Produit	Diamètre	Référence	ACL 13
Adapt Anneaux Protecteurs Standards (boîte de 20 unités)	48 mm-4,45 mm	<b>7805</b>	3401095789479
	48 mm-2,3 mm (slim)	<b>7815</b>	3401029562925
	98 mm-4,45 mm	<b>7806</b>	3401095789530
Adapt Anneaux Protecteurs CeraRing (boîte de 20 unités)	48 mm-4,45 mm	<b>8805</b>	3401060164553
	48 mm-2,3 mm (slim)	<b>8815</b>	3401060164577

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

**0 800 47 92 67** Service & appel gratuits

[assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)

**Hollister France**  
Tour Franklin  
100/101 Terrasse Boieldieu  
92042 Paris La Défense Cedex

[www.hollister.fr](http://www.hollister.fr)

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt et CeraRing sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : nov 2017. Référence : FR0195